



**TECHNICAL HELP SPAIN S.L.**  
Distribuidor Oficial de:



www.spainth.es - Email: info@spainth.es - Telf: 654 31 60 88

## IntimateRider



Cuando un hombre sufre una lesión medular ú otro tipo de discapacidad una de las necesidades básicas que son las relaciones sexuales se ven muy mermadas y limitadas.

### ¿Qué es IntimateRider?

Es una silla móvil diseñada para ofrecer un movimiento natural de oscilación que mejora la movilidad sexual en personas con discapacidad física. Esta diseñada por una persona tetrapléjica con una lesión a nivel C6-C7 con el movimiento de brazos limitado. No cuenta con motor, sólo es necesario el movimiento del torso ó incluso de la cabeza para generar el impulso necesario.

### ¿Cómo funciona?

La estructura de acero se asienta en el suelo estableciendo un centro de gravedad bajo, lo cual permite que la transferencia al asiento y la actividad sexual sean más fáciles. Los rodamientos hacen que el asiento pueda oscilar de forma natural y muy suave. Basta con sentarse en el asiento y realizar un leve movimiento adelante y hacia atrás para facilitar el balanceo.


### ¿Quién puede utilizar el IntimateRider?

Cualquier pareja puede disfrutar de los movimientos de IntimateRider. Las parejas en las que el hombre padece los efectos de una discapacidad física son las más beneficiadas: Lesionados medulares, espina bífida, ictus, artritis y un largo etc. El beneficio no es solo para la persona con discapacidad sino que también para su pareja ya que las relaciones volverán a ser similares a antes de tener la discapacidad.

## Accesorios y Packs

### Ridermate

Es el complemento perfecto para sacarle el mayor partido a IntimaRider. Con este accesorio podras disfrutar de múltiples posiciones.

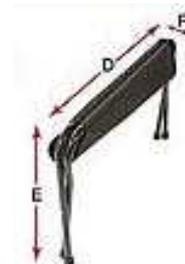

	Especificación	Medida (cm)
A	Anchura	96.5
B	Altura	37.5
C	Profundidad	46
D	Anchura plegado	96.5
E	Altura plegado	54.5
F	Profundidad plegado	7.6



**TECHNICAL HELP SPAIN S.L.**  
Distribuidor Oficial de:



www.spainth.es - Email: info@spainth.es - Telf: 654 31 60 88

### Ridermate Deluxe

Es otro complemento para poder variar y disfrutar de múltiples posiciones.  
Para mujeres con discapacidad utilizando una de las cuñas les ofrecerá un mayor apoyo y distintas posiciones en la cama.



### Cojín para IntimateRider

Este asiento acolchonado ha sido diseñado especialmente para el asiento del IntimateRider. Proporciona comodidad y apoyo óptimos.

Está fabricado con un núcleo de espuma suave diseñado para apoyar el cuerpo en movimiento y una funda de microfibra suave y lavable.

Se recomienda su utilización a personas con lesión medular u otro tipo de discapacidad que requiera un especial cuidado de las zonas de apoyo.

### Pack Intimate Plus

Pack compuesto de:  
IntimateRider + Ridermate + Cojín

Este pack es el conjunto perfecto para volver a disfrutar de tus relaciones sexuales.



### Bolsa de transporte

Esta disponible tanto para IntimateRider como para Ridermate.  
Con este accesorio llévate tu IntimateRider donde quieras.



**TECHNICAL HELP SPAIN S.L.**  
Distribuidor Oficial de:



www.spainth.es - Email: info@spainth.es - Telf: 654 31 60 88

## IntimateRider - Características y Dimensiones

### DISEÑO

Los materiales utilizados y su diseño cuidan de tu cuerpo y te proporcionan el confort necesario.

### RESPALDO

La altura de respaldo te proporciona estabilidad y confort.

### ASIENTO

La profundidad del asiento esta optimizada para proporcionar la libertad de movimiento que necesitas.

### MOVIMIENTO

El sistema de rodamientos proporciona un movimiento natural y fluido conseguido con un mínimo movimiento de tronco ó de cabeza.

### PATAS

Sus patas con goma antideslizante permiten utilizarlo en cualquier superficie.

### PLEGADO

Cuando no lo utilices guárdalo en cualquier rincón discreto gracias a su plegado.



	Especificación	Medida (cm)
A	Altura total	73.6
B	Anchura lateral entre patas	52
C	Altura del asiento al suelo	42
D	Altura del respaldo	38
E	Anchura total entre patas	54.6
F	Anchura del asiento	51
G	Profundidad del asiento	23
H	Altura de la silla plegada	84
I	Anchura de la silla plegada	19



**TECHNICAL HELP SPAIN S.L.**  
Distribuidor Oficial de:



[www.spainth.es](http://www.spainth.es) - Email: [info@spainth.es](mailto:info@spainth.es) - Telf: 654 31 60 88

## **IntimateRider - Preguntas mas frecuentes**

### **¿Es estable?**

IntimateRider es muy estable y está diseñado para ser muy difícil de volcar. Únicamente es preciso tener precaución en el momento de la transferencia desde la silla de ruedas.

### **¿Es fácil realizar la transferencia al IntimateRider desde mi silla de ruedas?**

Es tan sencillo como entrar y salir de un coche o sentarse en el WC. Puede ser muy útil colocar el IntimateRider cerca de la cama o algo que te pueda resultar de ayuda, si es necesario, dependiendo de la movilidad o destreza que poseas al realizar las transferencias. Simplemente las primeras veces que lo utilices tomale las cosas con calma. Para personas tetraplégicas con limitaciones en el movimiento de brazos que utilicen ó no tabla de transferencia no deben tener demasiada dificultad para utilizarlo, también cabe indicar que cuando lo utilices no estarás solo así que tu pareja podrá ayudarte a la hora de transferirte.

### **¿Puedo sufrir úlceras por presión?**

Todo debe hacerse con moderación. No recomendamos pasar un gran número de horas sentado en el IntimateRider. Tampoco te recomendamos usar IntimateRider si tienes una úlcera por presión ya que puede irritarse más. Si usas el cojín para IntimateRider no deberías tener ningún problema. Te recomendamos usarlo durante unos pocos minutos las primeras veces y luego inspeccionar tu piel para ver si estás experimentando cualquier enrojecimiento o malestar y dejar de usarlo si aparece algún problema.

### **¿Puedo sufrir rozaduras usando IntimateRider?**

Con un uso normal no debes tener abrasiones debido a que tu parte inferior no debe deslizarse debido a que tu espalda está apoyada. Se trata de que los rodamientos hagan todo el trabajo. Tendrías que realizar movimientos muy agresivos para experimentar rozaduras.

### **Soy tetraplégico. ¿Puedo usar IntimateRider?**

Depende del nivel de tu lesión y de tu capacidad para realizar la transferencia. Para usar IntimateRider es preciso ser capaz de realizar algunos movimientos del brazo para estabilizarte.

### **¿Cuál es el peso máximo que soportan IntimateRider y RiderMate?**

El equipo está diseñado para soportar un peso máximo de 125Kg.