

COJÍN ALOVA® PERFILADO



COJÍN MOLDEADO CON DESCARGA DEL CÓCCIX EN MATERIAL VISCO ELÁSTICO. PARA USUARIOS CON PESO HASTA 200 KG.

- **Eficacia:** el material visco elástico ALOVA® favorece la inmersión de las partes del cuerpo en contacto con el soporte, para reducir los valores máximos de presión.
- **Seguridad:** cojín en declive para evitar los deslizamientos hacia delante, protección integral, parte inferior antideslizante.
- **Confort:** Textil transpirable, mejora la termorregulación.

Descarga del cóccix disminuyendo el riesgo de escaras. Reducción mínima del riesgo de escaras al nivel de la zona isquiática (altura > a 6cm).



- Disponible con **tope pélvico**.

Tope de apoyo pélvico para reducir el deslizamiento hacia delante. Altura >8 cm.

A la hora de seleccionar un cojín ALOVA® con tope pélvico es muy importante tener en cuenta el sexo del usuario así como el peso del mismo.

Si es masculino, debido a la constitución, se recomienda seleccionar un cojín de mayor profundidad para que el usuario se sienta cómodo.

Para el sexo femenino este aspecto no es tan importante, la selección se realizará en función del peso.

COJÍN VISCO ELÁSTICO ALOVA® PERFILADO

EFICACIA


- Confort
- Abducción de la cadera. Rotadores externos.

- Prevención de úlceras de decúbito sacro coxígeas. Descarga de cóccix.

- Mejora de las transferencias. Aumento del radio.

- Reducción del riesgo de caída. Inclinación del asiento.

- Refuerzo de la prevención de las escaras isquiáticas. Descarga de cóccix. Grosor > 6 cm

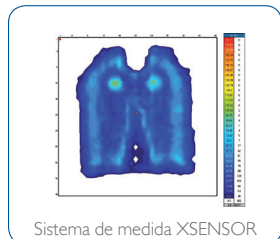

Cartografía de los valores de la repartición de las presiones para un paciente de 172 cm y 80 kg



Identificación de las medidas del cojín sobre la espuma.



Etiqueta trasera de la funda con las dimensiones.

- Asa situada debajo el cojín: menor riesgo de rasgones y mayor higiene.
- Parte inferior antideslizante. Funda de protección extraíble.



Ergonomía: 16 tallas y 3 alturas: peso paciente máximo hasta 200 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	ALTO (cm) Mín. / Máx.*	PESO PACIENTE Kg	FUNDA	PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
ALOVA® Ergonómico	VCAE/M4343	43	43	9	30 a 100	Protección integral en Promust PU (tejido elástico revestido con poliuretano) color negro en la parte superior y color gris en la parte inferior y laterales. Parte inferior antideslizante en tejido PU/PVC Los cojines se suministran con dos fundas.	EN 597-1 EN 597-2
ALOVA® Perfilado estándar	VCAG3636	36	36	6/9	20 a 80		
ALOVA® Perfilado varias tallas	VCAG4343	43	43	6/9	30 a 100		
	VCAG4340	43	40	6/9	30 a 90		
	VCAG4540	45	40	6/9	30 a 120		
	VCAG3841	38	41	6/9	30 a 90		
	VCAG4041	40	41	6/9	30 a 90		
	VCAG4341	43	41	6/9	30 a 100		
	VCAG4043	40	43	6/9	30 a 90		
	VCAG4544	45	44	6/9	30 a 120		
ALOVA® Perfilado varias tallas XL	VCAG4343XL	43	43	9/12	30 a 110		
	VGAG5044XL	50	44	9/12	30 a 135		
ALOVA® Perfilado varias tallas XXL	VCAG5250	52	50	7/10	120 a 160		
	VCAG5450	54	50	7/10	120 a 160		
	VCAG5650	56	50	7/10	120 a 200		
	VCAG6050	60	50	7/10	120 a 200		
ALOVA® Perfilado Tope de apoyo pélvico	VCAG3841BP	38	41	6/9	30 a 90		
	VCAG4041BP	40	41	6/9	30 a 90		
	VCAG4341BP	43	41	6/9	30 a 100		
	VCAG4343BP	43	43	6/9	30 a 100		
	VCAG4544BP	45	44	6/9	30 a 120		
	VCAG5044BP	50	44	6/9	30 a 135		
	VCAG4347BP	43	47	6/9	30 a 120		

* Altura mínima = Altura del cojín en fondo de perfil / Altura máxima = Altura total del cojín.
Funda de protección compatible con los productos detergentes-desinfectantes de uso hospitalario.

Mantenimiento: Fundas en Promust PU



Virmedic S.L. Grupo Winnicare C/ Perellonet, 1 – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel: +34 9 61 56 55 21 – Fax: +34 9 61 56 03 83 – E-mail: ventas@winnicare.es

www.winnicare.es

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNICARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

3 años de garantía (el cojín)

Fabricado por

ASKLÉSANTÉ
WINNICARE

