

Guía de uso



1. Llevar el OdoCare a la habitación o al baño



2. Girar el asa hasta que el cabezal esté en posición abierta



3. Ponerse los guantes



4. Tirar dentro del contenedor los pañales (preferentemente embolsados) y los guantes



5. Girar el asa para que los desechos caigan dentro del contenedor



Cómo cambiar la bolsa

Karinter

OdoCare
Odourless Storage Solutions




1. Presionar el botón negro y levantar las dos solapas juntas



Changing the bag

2. Levantar todo el cabezal

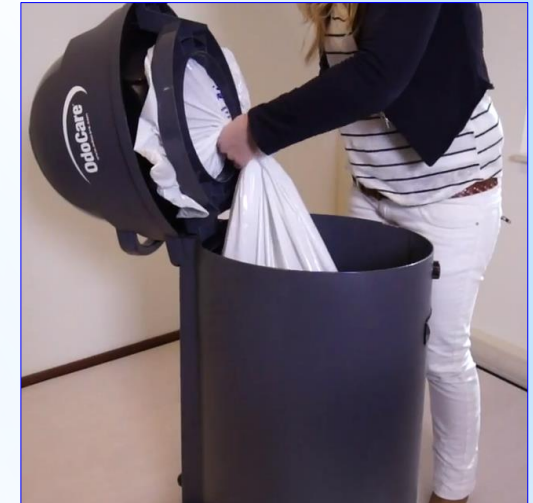

3. Estirar la bolsa por debajo del aro para evitar fugas de olor



4. Hacer un nudo a la bolsa y cerrar el contenedor OdoCare



5. Sujetar el asa trasera y presionar con el pie el pedal delantero para liberar el contenedor



6. Levantar el contenedor por encima de la bolsa

Cómo poner los recambios



1. Colocar el recambio en la apertura superior y apretar hacia abajo



2. Asegurarse que el recambio no sobresale y no dificulta el movimiento del cabezal



3. Abrir todo el cabezal de OdoCare



4. Colocar la bolsa a través del aro para sujetar las bolsas



5. Doblar la parte sobrante de la bolsa alrededor del aro, NO por fuera del contenedor



6. Asegúrese que no ve la bolsa por fuera del contenedor

Cómo limpiar el contenedor



1. Presionar el pequeño botón negro y al mismo tiempo presionar el botón negro más grande que se utiliza para abrir el contenedor

2. Levantar la pestaña al mismo tiempo que aguantamos el cabezal por el asa para que éste se deslice y quede suelto



4. Lavar el cabezal con detergentes de pH neutro.
NO usar lejías



5. Limpiar todo el cabezal por dentro y por fuera. Limpiar también la parte negra donde descansa el cabezal para favorecer el deslizamiento del mismo en el momento del uso.

