

## Despiece





A. Asiento B. Reposabrazos C. Cesta D. Caja baterías E. Frontal F. Parte trasera G. poste asiento

### 1. Montaje manillar:

Sosteniendo el manillar, suelte el candado con el manillar hacia arriba y luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj para mantenerlo apretado. Suelte la perilla de bloqueo en frente del manillar.

### 2. Conectar la parte trasera con la frontal:

Alineación de chasis. Levante el bastidor delantero y trasero y asegúrese de que el gancho del bastidor delantero se encuentre con la barra transversal en el bastidor trasero y se conecte automáticamente.

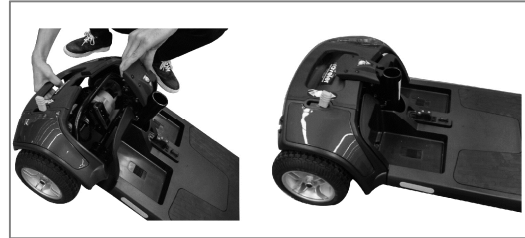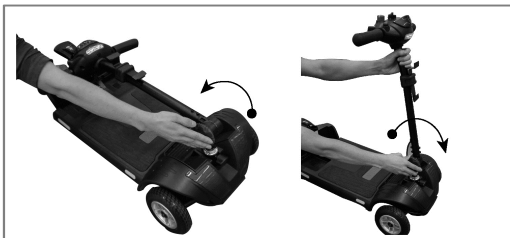

### 3. Poste asiento

Coloque el poste sobre el agujero y fíjelo con el pin.



### 4. Montaje caja baterías

Ponga la caja de las baterías en la posición correcta, y las baterías se conectarán automáticamente y se encenderán.



### 5. Montaje cesta

Inserte la cesta en el poste, tal y como aparece en la foto.



### 6. Montaje asiento

Coloque el asiento encima del poste, y rótelo hasta que se mantenga en posición fija.

Insertar los reposabrazos. Insértelos en el tubo inferior del asiento, fíjelo con el pin y apriete el botón de bloqueo hasta fijarlo.



### 7. Foto final

